


# KIT OTS MEDICA SRL

## REF. 1000123

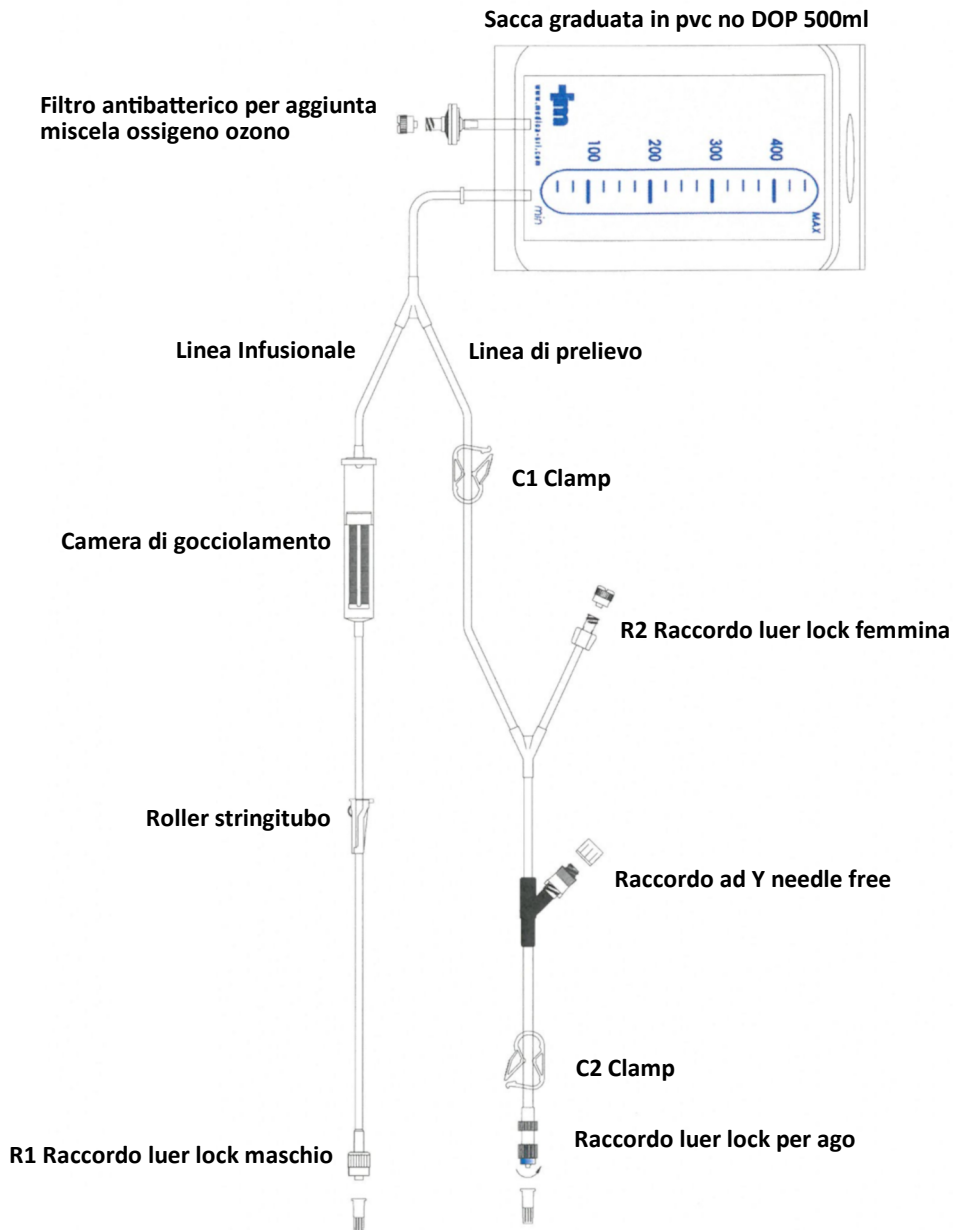

## Istruzioni d'uso

- 1) Scartare il blister e dopo aver verificato il disposable chiudere il circuito unendo la linea infusionale con quella di prelievo, quindi avvitare R1 con R2 (dopo aver tolto i relativi tappi).
- 2) Chiudere il roller stringitubo e la clamp C2 e introdurre la quantità di anticoagulante desiderata tramite raccordo ad Y needle free (dopo aver tolto il tappo).
- 3) Posizionare la sacca sulla bilancia e tarare la bilancia impostando la quantità di sangue da prelevare.
- 4) Dopo aver inserito l'ago in vena al paziente effettuare il prelievo ematico aprendo le clamp C2.
- 5) Rimuovere il laccio emostatico e procedere con il prelievo fintanto che non verrà raggiunto il volume di sangue impostato sulla bilancia.
- 6) Al raggiungimento della quantità di sangue desiderata, chiudere le clamp C1 e C2 e premere il tasto "fine ciclo" sulla bilancia.
- 7) Appendere la sacca sull'asta portaflebo ed inserire la quantità di gas ossigeno ozono attraverso il filtro antibatterico (dopo aver tolto il tappo), facendola gorgogliare.
- 8) Prendere la sacca e miscelare delicatamente il contenuto fino al viraggio di colore.
- 9) Posizionare la sacca sulla bilancia e attraverso il raccordo ad Y riempire con una piccola quantità di soluzione fisiologica la linea infusionale fino alla base della camera di gocciolamento.
- 10) Riprendere la sacca e posizionarla sull'asta portaflebo. Premere sulla camera di gocciolamento per richiamare il sangue dalla sacca e riempire di un terzo la camera stessa.
- 11) Aprire la clamp C2 e reinfondere alla velocità dettata dal paziente.
- 12) In caso di rallentamento della reinfusione aumentare la distanza tra il braccio e la sacca alzando l'asta portaflebo.